

Belangrijk is om de protocollen van de fabrikant aan te houden (zie handleidingen / website fabrikanten).

**Reinigen van de A-dec fles:**

Vul fles met een 1:10 mengverhouding bleek (sodium hypochlorite, concentratie 0,5%). Vul de fles met deze oplossing en laat dit 10 - 20 minuten staan. Vervolgens de fles goed naspoelen met water!

De vulslang kan inwendig gereinigd worden met een rager (bijvoorbeeld: A-dec 049.005.01 of A-dec 049.002.01).

In geval van langdurige onderbrekingen, het reservoir leegmaken en alleen terug vullen wanneer het werk wordt hervat nadat men de ontsmetting / reiniging heeft uitgevoerd volgens de voorgenoemde instructies.

**Spoelen van de waterleidingen middels autonoom watersysteem (bij aanvang werkzaamheden / voor dagelijks waterline-onderhoud):**


Werp een ICX-tablet in de waterfles.

- 1.) Vul de fles met leidingwater.
- 2.) Wacht 2 minuten totdat de ICX-tablet volledig is opgelost.

**De flush (spoel) -functie kunt u activeren op de achterzijde van de instrumentenbrug:**

De instrumentenslangen (zonder hoekstukken) kunnen gelijktijdig geflushed worden.

De multifunctiespuit(-en) dienen separaat geactiveerd te worden door middel van het indrukken van de waterknop op de spuit.

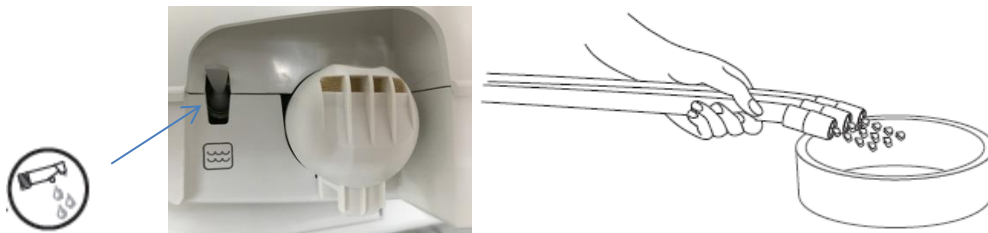

ICX-tabletten A-dec code 90.1065.00 (ICX 2 liter) / A-dec code 90.1064.00 (ICX 0,7 liter) is via ons onderdelenmagazijn te bestellen: 0416-675030 / [magazijn@arseus-dental.nl](mailto:magazijn@arseus-dental.nl).

Bij eventuele vervuiling van de interne waterline adviseren wij je contact op te nemen met de technische dienst voor het uitvoeren van een shock treatment (0416-675060 / [planningsservice@arseus-dental.nl](mailto:planningsservice@arseus-dental.nl)).

Test of monitor de bacterie-hoeveelheid van het water d.m.v. een teststrip bijvoorbeeld Alpro Biotest Plus (let op: deze waarde geeft slechts een indicatie).